



Beschreibung

SPYCRA Max ist ein steriler, nicht-haftender, superabsorbierender Verband zur Verwendung bei stark exsudierenden Wunden. SPYCRA Max besteht aus einer atmungsaktiven und wasserdichten Vliesstoffschicht, einem superabsorbierenden Polster und einer feuchtigkeitsregulierenden Gewebeschicht. Der mehrschichtige Aufbau erleichtert das Flüssigkeitsmanagement und sorgt für ein optimales, feuchtes Wundmilieu, was zu einer schnelleren Wundheilung führt. Das saugfähige Kissen sorgt für eine hervorragende Absorption und schließt Exsudate ein, wodurch das Risiko einer Mazeration und eine Schädigung der Haut in der Wundumgebung minimiert wird.

Anwendung

SPYCRA Max ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden, einschließlich Beingeschwüren, Druckgeschwüren, diabetischen Fußgeschwüren und Wunddehiszenzen nach chirurgischen Eingriffen.

Kontraindikationen

1. SPYCRA Max nicht auf trockenen oder schwach exsudierenden Wunden, Augen, Schleimhäuten oder in Wundhöhlen verwenden, da der Verband während der Absorption anschwillt. Nicht bei Verbrennungen dritten Grades anwenden.
2. SPYCRA Max sollte nicht bei Personen mit einer bekannten Allergie oder Überempfindlichkeit gegen den Verband oder seine Bestandteile verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

1. Nachdem die Wunde gereinigt wurde, sollte die geeignete Größe des Verbandes gewählt werden, sodass eine ausreichende Überlappung der intakten Haut um den Wundrand gewährleistet ist.
2. SPYCRA Max kann sowohl als Primärverband als auch als Sekundärverband verwendet werden. Wenn SPYCRA Max als Primärverband verwendet wird, muss es in engem Kontakt mit dem Wundbett liegen, um sicherzustellen, dass die Wundflüssigkeit absorbiert wird. SPYCRA Max ist nicht haftend und muss mit zusätzlicher Unterstützung durch einen Fixierverband oder einen leichten bis mittelschweren Kompressionsverband fixiert werden.
3. Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Menge des Exsudats ab.
4. Das Entfernen des Verbandes kann durch Befeuchten des Verbandes mit Kochsalzlösung erleichtert werden.
5. Unter Beachtung der örtlichen Vorschriften als kontaminierter Abfall zu entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Nicht wiederverwendbar. Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt oder geöffnet.
2. Wundauflage nicht zuschneiden

Produktverfügbarkeit

Artikel	Größe Produkt	Größe der Wundauflage
SPY M-A - 7575	75 mm x 75 mm / 3.0 in. x 3.0 in.	50 mm x 50 mm / 2.0 in. x 2.0 in.
SPY M-A - 1010	100 mm x 100 mm / 3.9 in. x 3.9 in.	75 mm x 75 mm / 3.0 in. x 3.0 in.
SPY M-A - 1515	150 mm x 150 mm / 5.9 in. x 5.9 in.	120 mm x 120 mm / 4.7 in. x 4.7 in.
SPY M-A - 1520	150 mm x 200 mm / 5.9 in. x 7.9 in.	120 mm x 170 mm / 4.7 in. x 6.7 in.
SPY M-A - 2020	200 mm x 200 mm / 7.9 in. x 7.9 in.	170 mm x 170 mm / 6.7 in. x 6.7 in.
SPY M-A - 2030	200 mm x 300 mm / 7.9 in. x 12 in.	170 mm x 270 mm / 6.7 in. x 10.6 in.

Gebrauchte Symbole

Symbol	Erläuterung	Symbol	Erläuterung
	Haltbarkeitsdatum		Warnhinweis
	Chargennummer		Nicht wiederverwendbar
	Hersteller		Siehe Gebrauchsanweisung
	Datum des Herstellers		Lager-Temperatur
	Medizinprodukt		CE-Zertifiziert
	Bevollmächtigter EU Vertreter		Sterilisiert mit Ethylenoxid
	Sterilverpackung		Nicht resterilisieren
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist		

Lagerung

Bitte lagern Sie **SPYCRA Max** an einem kühlen, trockenen Ort und vor Sonnenlicht geschützt.

Haltbarkeit 3 Jahre ab Herstellungsdatum

Importeur

Reskin Medical NV.

Poort West-Limburg 1399; Industrieweg 114-3980 Tessenderlo – Belgien

Tel: +32 13 353624

Fax: +32 13 671368

Website: www.reskin.eu

Hersteller

Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.

North Shangxia Rd. Dongjiang Hi-tech Industry Park, 516005, Huizhou, P.R. China

Tel: +86-752-5302185, Fax: +86-752-5302020

Website: www.foryoumedical.com