

Beschreibung

SPYCRA Sil-Foam Border besteht aus einer Silikon-Wundkontakttschicht, einem saugfähigen PU-Schaum, einer Vliesschicht, einem superabsorbierenden Saugkern und einer Trägerschicht. Der fünfteilige Aufbau ermöglicht ein dynamisches Flüssigkeitsmanagement für ein optimales feuchtes Wundmilieu, was zu einem schnelleren Wundverschluss führt und dazu beitragen kann, dass das Mazerationsrisiko verringert wird. Die weiche Silikonschicht kann angehoben und neu positioniert werden, ohne ihre Haftfähigkeit zu verlieren. Außerdem können mithilfe dieser Schicht die Schmerzen der Patienten sowie das Trauma für die Wunden und die Wundumgebungshaut beim Verbandwechsel minimiert werden. Die absorbierende Polsterschicht sorgt für eine hervorragende Absorption und schließt Exsudate ein.

Anwendungen

SPYCRA Sil-Foam Border Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden, vorausgesetzt es handelt sich um mittel bis stark exsudierende und oberflächliche bis tiefe wie zum Beispiel Dekubitalulzera Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden Hautentnahme - und empfangenstellen Schürfwunden und Verbrennungen (1. und 2. Grades).

Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden.

Gebrauchsanweisung

1. Reinigen Sie die Wunde und wählen Sie einen Verband in der passenden Größe; der innere Rand des Verbandes sollte die Wunde bei kleinen Maßen um mindestens 1-2 cm und bei großen Maßen um mindestens 5 cm überlappen.
2. Die Wundumgebungshaut gründlich trocknen.
3. Die Trennfolien entfernen und die haftende Seite auf die Wunde aufbringen.














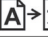




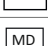

Vorsichtsmaßnahmen

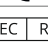1. Nicht wiederverwendbar. Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt oder geöffnet.
2. Wundaufgabe nicht zuschneiden.
3. Den **SPYCRA Sil-Foam Border** nicht zusammen mit oxidierenden Wirkstoffen wie Hypochloritlösungen oder Wasserstoffperoxid anwenden.
4. Bei Auftreten einer Rötung oder Sensibilisierung die Anwendung abbrechen.
5. **SPYCRA Sil-Foam Border** kann, abhängig vom Zustand des Patienten und dem Exsudationsgrad, bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Bei kontinuierlicher Anwendung darf die Tragedauer 30 Tage nicht überschreiten.

Produktverfügbarkeit

Artikel	Größe Produkt	Größe der Wundaufgabe
SIL FOAM - 7575	75 mm x 75 mm / 3.0 in. x 3.0 in.	45 mm x 45 mm / 1.7 in. x 1.7 in.
SIL FOAM - 1010	100 mm x 100 mm / 3.9 in. x 3.9 in.	62 mm x 62 mm / 2.4 in. x 2.4 in.
SIL FOAM - 125125	125 mm x 125 mm / 4.9 in. x 4.9 in.	85 mm x 85 mm / 3.3 in. x 3.3 in.
SIL FOAM - 175175	175 mm x 175 mm / 6.9 in. x 6.9 in.	125 mm x 125 mm / 4.9 in. x 4.9 in.
SIL FOAM - 2020	200 mm x 200 mm / 7.9 in. x 7.9 in.	150 mm x 150 mm / 5.9 in. x 5.9 in.
SIL FOAM - 2030	200 mm x 300mm / 7.9 in. x 12 in.	150 mm x 240 mm / 5.9 in. x 9.4 in.

Gebrauchte Symbole

Symbol	Erläuterung	Symbol	Erläuterung
	Haltbarkeitsdatum		Warnhinweis
	Chargennummer		Nicht wiederverwendbar
	Hersteller		Siehe Gebrauchsanweisung
	Datum des Herstellers		Lager-Temperatur
	Medizinprodukt		CE-Zertifiziert
	Importeur		Bevollmächtigter EU Vertreter
	Nicht dem Sonnenlicht aussetzen		Nicht erneut sterilisieren
	Trocken halten		Übersetzung
	Einzelnes Sterilbarriersystem		Sterilisiert mit Ethylenoxid
	Nicht verwenden, wenn die innere Verpackung beschädigt ist; Gebrauchsanweisung beachten		Unique Device Identification

Lagerung

Bitte lagern Sie **SPYCRA Sil-Foam Border** an einem kühlen, trockenen Ort und vor Sonnenlicht geschützt.

Haltbarkeit 3 Jahre nach Produktionsdatum

Importeur

Reskin Medical NV.

Poort West-Limburg 1399; Industrieweg 114 -3980 Tessenderlo – Belgien
 Tel: +32 13 353624
 Fax: +32 13 671368
 Website: www.reskin.eu

Fabrikant

Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.

North Shangxia Rd. Dongjiang Hi-tech Industry Park, 516005, Huizhou, P.R. China
 Tel: +86-752-5302188, Fax: +86-752-5302088
 Website: www.foryoumedical.com