



LIQUEEBACT

SUPERABSORBIERENDER AKTIVKOHLE-VERBAND


24
2024 / 06

LIQUEEBACT

Superabsorbierender Aktivkohle-Verband

LIQUEEBACT ist ein mehrlagiger Wundverband mit integriertem Aktivkohlestoff-Vlies, indiziert zur Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden, chronischen, akuten und/oder übelriechenden Wunden. Die superabsorbierende Schicht (Kern aus superabsorbierendem Polymer [SAP]) verfügt über hervorragende Saug- und Retentioneigenschaften, nimmt Wundflüssigkeit schnell auf und schließt diese sicher ein.

Die antimikrobiell wirkende Aktivkohleschicht bindet Bakterien und Keime durch ein physikalisches Prinzip, ohne die Abgabe von Wirkstoffen. Eine reduzierte Keimlast in der Wunde sorgt für einen besseren Heilungsverlauf, minimiert zusätzlich üble Wundgerüche und kann die Lebensqualität Ihres Patienten steigern.

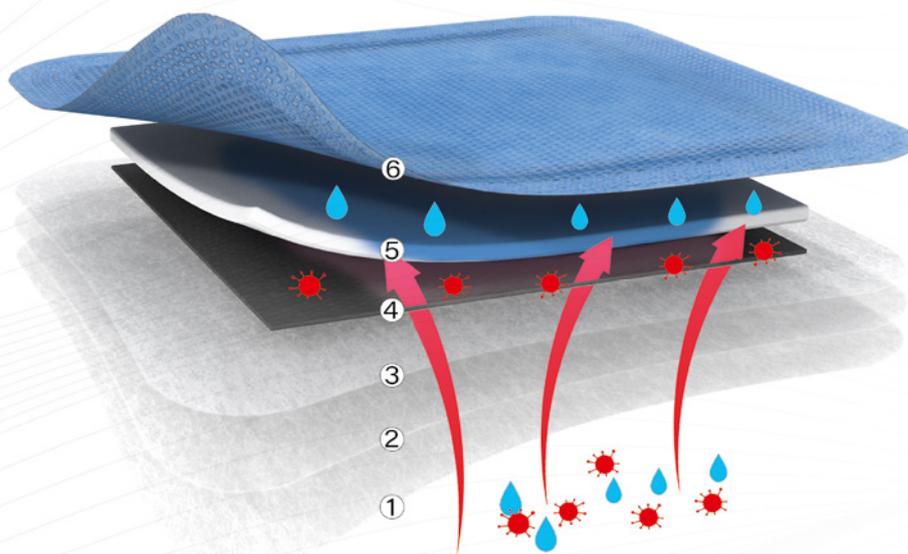

Funktionsprinzip des mehrschichtigen Aufbaus

Die hydrophilen Wundkontaktsschichten **[1][2]** leiten die Wundflüssigkeit nach oben in die Verteilungsschicht, die das Exsudat schnell und gleichmäßig aufnimmt und nach oben in die absorbierende Schicht **[5]** transportiert. Die, vor dem superabsorbierenden Kern **[5]** befindliche, antimikrobiell wirkende Aktivkohleschicht **[4]** bindet Bakterien, Keime und Gerüche, bevor der SAP-Kern **[5]** das Exsudat aufnimmt und sicher einschließt. Die flüssigkeitsabweisende Wäscheschutzschicht **[6]** mit ihren dampfdurchlässigen Eigenschaften verhindert, bzw. minimiert das Durchschlagen von Exsudat, die Atmungsaktivität wird verbessert und somit die Fähigkeit des Exsudatmanagements gesteigert.

Leistungen

- ✓ schnelle und starke Aufnahme aller Exsudationsgrade
- ✓ effektive Geruchs- und Keimbindung
- ✓ weich und anschmiegsam
- ✓ Wäscheschutzschicht minimiert und verhindert Flüssigkeitsdurchschlag

Exsudatmenge (E)

- kein /gering
- mäßig 
- stark 
- sehr stark 

Wundphase (P)

- feuchte Nekrose 
- Fibrinbelag 
- Granulation 
- Epithelisierung 
- Infektion 

Wundtiefe (W)

- flach 
- tief 
- Cavität 

LIQUEEBACT

Superabsorbierender Aktivkohle-Verband

LIQUEEBACT ist indiziert zur Behandlung für mäßige bis starke Exsudation und kann bei chronischen, akuten und übelriechenden Wunden angewendet werden, wie z.B. Druckgeschwüren, venösen und arteriellen Beingeschwüren, diabetischen Geschwüren, diabetischen Fußgeschwüren, exulzierenden Tumoren, Karzinomen, Transplantationsstellen, Verbrennungen 1. und 2. Grades, Schürf- und Risswunden.

LIQUEEBACT kann auch unter Kompressionsverbänden angewendet werden.



Leistungen

- ✓ schnelle und starke Aufnahme aller Exsudationsgrade
- ✓ effektive Geruchs- und Keimbindung
- ✓ weich und anschmiegsam
- ✓ Wäscheschutzschicht minimiert und verhindert Flüssigkeitsdurchschlag

Indikationen

- ✓ Chronische und akute Wunden
- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Venöse und arterielle Beingeschwüre
- ✓ Diabetische Geschwüre
- ✓ Diabetische Fußgeschwüre
- ✓ Exulzierende Tumore
- ✓ Karzinome
- ✓ Transplantationsstellen
- ✓ Verbrennungen 1. und 2. Grades
- ✓ Schürf- und Risswunden

	Größe Wundauflage	Zusatzinformation	VE	PZN	REF
-	-	-	-	-	-
M	10 cm x 10 cm	medium	1 x 10	18791539	LQB-1010
L	10 cm x 20 cm	large	1 x 10	18791545	LQB-1020
XL	20 cm x 20 cm	extra large	1 x 10	18791551	LQB-2020

*L+F Medizinprodukte GmbH
Birkenweiher Straße 4
63505 Langenselbold
Germany [DE]*

*Phone: +49 6184 99 53 357
Fax: +49 6184 99 53 358
E-Mail: info@lf-med.de
Web: lf-medizinprodukte.de*